

Produto

Agulha para caneta de insulina

Cadastro / Registro M.S.

81840549002

Indicação de Uso

Dispositivo médico, classe II, estéril, descartável, de uso único e fácil manipulação, especialmente projetado para acoplar as diversas marcas de caneta aplicadora de medicamentos, através da ponta dupla e sistema de rosca universal, padrão ISO 11608-2. Elaborada em aço inox grau médico, possui duas extremidades, sendo uma para a perfuração do recipiente (flaconete) e extração do medicamento, e a outra, com ponta trifacetada, e extensão lubrificada, para penetrar a epiderme, alcançando o tecido subcutâneo. Elaborada em diversos tamanhos (diâmetros x comprimentos), adequados à administração subcutânea em pacientes adultos ou pediátricos.

Modelos cadastrados

Código	mm	Gauge x mm	Cor
123404	0.18mm×4mm	34G×4mm	amarelo
123304	0.20mm×4mm	33G×4mm	rosa
123305	0.20mm×5mm	33G×5mm	azul claro
123306	0.20mm×6mm	33G×6mm	branco
123204	0.23mm×4mm	32G×4mm	verde claro
123205	0.23mm×5mm	32G×5mm	marrom
123206	0.23mm×6mm	32G×6mm	bege
123208	0.23mm×8mm	32G×8mm	azul petróleo
123104	0.25mm×4mm	31G×4mm	azul piscina
123105	0.25mm×5mm	31G×5mm	roxo
123106	0.25mm×6mm	31G×6mm	azul royal
123108	0.25mm×8mm	31G×8mm	laranja
123005	0.30mm×5mm	30G×5mm	vermelho
123006	0.30mm×6mm	30G×6mm	cinza escuro
123008	0.30mm×8mm	30G×8mm	amarelo
123010	0.30mm×10mm	30G×10mm	verde
122906	0.33mm×6mm	29G×6mm	bege
122908	0.33mm×8mm	29G×8mm	cenoura
122910	0.33mm×10mm	29G×10mm	verde bandeira
122912	0.33mm×12mm	29G×12mm	rosa

Uso único - descartável - Látex free - Esterilizada em óxido de Etileno

Instruções de Uso

Antes de iniciar o procedimento, selecione o tamanho da agulha (diâmetro x profundidade) de acordo com as características do paciente, verifique a integridade da embalagem e data de validade do produto; Higienize as mãos, conforme orientação institucional;

- 1 Retire o lacre de segurança do produto, puxando-o para cima;
- 2 Utilizando um swab de álcool, faça a antisepsia da tampa perfurante do medicamento na caneta aplicadora, e em linha reta, conecte-a a base giratória da agulha, rosqueie até travar;
- 3 Selecione a dosagem da insulina ou medicamento, girando o seletor de medicamento;
- 4 Retire e guarde a capa transparente da agulha;
- 5 Faça a assepsia do local de injeção com swab de álcool;
- 6 Retire o protetor da agulha, e introduza em ângulo de 90°;
- 7 Pressione o botão de injeção da medicação, e mantenha-o pressionado por 10 segundos aproximadamente (a fim de que toda a dosagem do medicamento, penetre no tecido subcutâneo);
- 8 Retire a agulha, puxando a caneta para cima;
- 9 Cuidadosamente, posicione a capa transparente sobre uma superfície reta, encaixe a agulha dentro da capa empurrando-a com apenas uma mão, sem tocá-la;
- 10 Com a capa encaixada, desrosqueie a agulha, e descarte em recipiente rígido próprio para material perfuro cortante.

Validade

5 anos à partir da data de fabricação

Conservação, Armazenamento e Transporte

Armazenar em local limpo, seco, com excelente ventilação, sem presença de gases corrosivos, afastado da luz solar e calor excessivo, manter temperatura ambiente controlada;

Proteger da chuva ou umidade excessiva, observar os cuidados no transporte e armazenamento de produtos para a saúde, definidos pela ANVISA;

Advertência/Precaução

- * Não utilizar caso a embalagem esteja violada, ou úmida;
- * Manipular utilizando técnica asséptica;
- * Utilizar técnica de reencape sem tocar na tampa transparente, evitando acidentes perfuro cortantes;
- * Descartar em recipiente específico para material perfuro cortante, seguir as orientações institucionais.



 Rua Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande
Cariacica/ES CEP: 29146-430

 www.bramedhospitalar.com.br
contato@bramedhospitalar.com.br

 (27) 3070-6870

Importado e Distribuído

BRAMED comércio hospitalar do Brasil Ltda

Rua Mário Passos Costa, 378, Campo Grande, Cariacica - ES - CEP 29146-040 - CNPJ 28.345.933/0001-30

Fabricado por: Berpu Medical Technology Co., Ltd – China

Responsável Técnico: Simone M. M. M. Garcia - Coren-ES 82157

Versão resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Maiores informações requisite pelo email produto@bramedhospitalar.com.br