

Produto
Agulha Hipodérmica de Segurança

Cadastro / Registro M.S.
81840549007

Indicação de Uso

Agulha hipodérmica de segurança, é um artigo médico, classe II, utilizado para a administração de medicamentos e fluidos por via intradérmica-ID, subcutânea-SC, endovenosa-EV e intramuscular-IM, e também, para a coleta de amostras de sangue (arterial ou venoso) ou outros fluidos corporais para análise clínica. Possui **dispositivo de segurança**, cujo objetivo é recobrir e travar a agulha após a injeção, prevenindo o reuso, e acidentes perfuro cortantes; como determina a NR32.

Modelos cadastrados

Código	Nomenclatura Brasileira	TAMANHOS DE AGULHA			
		Diâmetros		Comprimentos	
SHN-1812	13 x 12	18G	1,2mm	1/2"	13mm
SHN-1858	16 x 12	18G	1,2mm	5/8"	16mm
SHN-1834	20 x 12	18G	1,2mm	3/4"	20mm
SHN-1810	25 x 12	18G	1,2mm	1"	25mm
SHN-18125	30 x 12	18G	1,2mm	1 1/4"	30mm
SHN-1815	40 x 12	18G	1,2mm	1 1/2"	40mm
SHN-1820	50 x 12	18G	1,2mm	2"	50mm
SHN-1912	13 x 11	19G	1,1mm	1/2"	13mm
SHN-1958	16 x 11	19G	1,1mm	5/8"	16mm
SHN-1934	20 x 11	19G	1,1mm	3/4"	20mm
SHN-1910	25 x 11	19G	1,1mm	1"	25mm
SHN-19125	30 x 11	19G	1,1mm	1 1/4"	30mm
SHN-1915	40 x 11	19G	1,1mm	1 1/2"	40mm
SHN-1920	50 x 11	19G	1,1mm	2"	50mm
SHN-2112	13 x 8	21G	0,8mm	1/2"	13mm
SHN-2158	16 x 8	21G	0,8mm	5/8"	16mm
SHN-2134	20 x 8	21G	0,8mm	3/4"	20mm
SHN-2110	25 x 8	21G	0,8mm	1"	25mm
SHN-21125	30 x 8	21G	0,8mm	1 1/4"	30mm
SHN-2115	40 x 8	21G	0,8mm	1 1/2"	40mm
SHN-2120	50 x 8	21G	0,8mm	2"	50mm
SHN-2212	13 x 7	22G	0,7mm	1/2"	13mm
SHN-2258	16 x 7	22G	0,7mm	5/8"	16mm
SHN-2234	20 x 7	22G	0,7mm	3/4"	20mm
SHN-2210	25 x 7	22G	0,7mm	1"	25mm
SHN-22125	30 x 7	22G	0,7mm	1 1/4"	30mm
SHN-2215	40 x 7	22G	0,7mm	1 1/2"	40mm
SHN-2220	50 x 7	22G	0,7mm	2"	50mm
SHN-2312	13 x 6	23G	0,6mm	1/2"	13mm
SHN-2358	16 x 6	23G	0,6mm	5/8"	16mm
SHN-2334	20 x 6	23G	0,6mm	3/4"	20mm
SHN-2310	25 x 6	23G	0,6mm	1"	25mm
SHN-23125	30 x 6	23G	0,6mm	1 1/4"	30mm
SHN-2315	40 x 6	23G	0,6mm	1 1/2"	40mm

Código	Nomenclatura Brasileira	TAMANHOS DE AGULHA			
		Diâmetros		Comprimentos	
SHN-2412	13 x 5,5	24G	0,55mm	1/2"	13mm
SHN-2458	16 x 5,5	24G	0,55mm	5/8"	16mm
SHN-2434	20 x 5,5	24G	0,55mm	3/4"	20mm
SHN-2410	25 x 5,5	24G	0,55mm	1"	25mm
SHN-24125	30 x 5,5	24G	0,55mm	1 1/4"	30mm
SHN-2415	40 x 5,5	24G	0,55mm	1 1/2"	40mm
SHN-2512	13 x 5	25G	0,5mm	1/2"	13mm
SHN-2558	16 x 5	25G	0,5mm	5/8"	16mm
SHN-2534	20 x 5	25G	0,5mm	3/4"	20mm
SHN-2510	25 x 5	25G	0,5mm	1"	25mm
SHN-25125	30 x 5	25G	0,5mm	1 1/4"	30mm
SHN-2515	40 x 5	25G	0,5mm	1 1/2"	40mm
SHN-2612	13 x 4,5	26G	0,45mm	1/2"	13mm
SHN-2658	16 x 4,5	26G	0,45mm	5/8"	16mm
SHN-2634	20 x 4,5	26G	0,45mm	3/4"	20mm
SHN-2610	25 x 4,5	26G	0,45mm	1"	25mm
SHN-26125	30 x 4,5	26G	0,45mm	1 1/4"	30mm
SHN-2615	40 x 4,5	26G	0,45mm	1 1/2"	40mm
SHN-2712	13 x 4	27G	0,40mm	1/2"	13mm
SHN-2758	16 x 4	27G	0,40mm	5/8"	16mm
SHN-2734	20 x 4	27G	0,40mm	3/4"	20mm
SHN-2710	25 x 4	27G	0,40mm	1"	25mm
SHN-27125	30 x 4	27G	0,40mm	1 1/4"	30mm
SHN-2715	40 x 4	27G	0,40mm	1 1/2"	40mm
SHN-2812	13 x 3,6	28G	0,36mm	1/2"	13mm
SHN-2858	16 x 3,6	28G	0,36mm	5/8"	16mm
SHN-2834	20 x 3,6	28G	0,36mm	3/4"	20mm
SHN-2810	25 x 3,6	28G	0,36mm	1"	25mm
SHN-2912	13 x 3,3	29G	0,33mm	1/2"	13mm
SHN-2958	16 x 3,3	29G	0,33mm	5/8"	16mm
SHN-2934	20 x 3,3	29G	0,33mm	3/4"	20mm
SHN-2910	25 x 3,3	29G	0,33mm	1"	25mm

Instruções de Uso

- 1 Selecione a agulha de acordo com o tipo de aplicação de injeção (ID, SC, EV ou IM) e características do paciente, verifique se a embalagem está íntegra e se a data de validade está vigente;
- 2 Utilizando técnica asséptica, abra a embalagem, conecte o canhão da agulha no bico da seringa, gire 180° até rosquear e travar a agulha na seringa;
- 3 Sem retirar a tampa transparente da agulha, posicione o dispositivo de segurança para trás, paralelo à seringa, de modo que não atrapalhe a visualização durante o procedimento;
- 4 Retire a tampa transparente da agulha, e proceda a aplicação da injeção;
Ao término da aplicação, retire a seringa, e acione imediatamente o dispositivo de segurança,
- 5 empurrando-o através da superfície dura de uma mesa ou aparador, ou empurrando-o com o polegar;
- 6 Confirme o travamento da agulha no dispositivo de segurança através do “click” audível;
- 7 Descarte a agulha em recipiente adequado, conforme protocolo institucional.

Validade

5 anos à partir da data de fabricação

Conservação, Armazenamento e Transporte

Armazenar em local limpo, seco, com excelente ventilação, sem grandes variações na temperatura ambiente, sem a presença de gases corrosivos, afastado da luz solar.

Advertência/Precaução

- * Não deve ser utilizado se a embalagem estiver danificada, rompida ou úmida.
- * Manipular utilizando técnica asséptica.
- * Certificar-se sempre do acionamento completo do dispositivo de segurança antes do descarte.
- * Descartar logo após o uso, em recipiente adequado, conforme protocolo institucional.

Importado e Distribuído

BRAMED comércio hospitalar do Brasil Ltda

Rua Mário Passos Costa, 378, Campo Grande, Cariacica - ES - CEP 29146-040 - CNPJ 28.345.933/0001-30

Fabricado por: Promisemed Hangzhou Meditech Co Ltd. - China

Responsável Técnico: Simone M. M. M. Garcia - Coren-ES 82157

Versão resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Maiores informações requisite pelo email produto@bramedhospitalar.com.br