

Produto

Agulha para caneta de insulina

Cadastro / Registro M.S.

81840549012

Indicação de Uso

Dispositivo médico, classe II, estéril, descartável, de uso único e fácil manipulação, especialmente projetado para acoplar as diversas marcas de caneta aplicadora de medicamentos, através da ponta dupla e sistema de rosca universal, padrão ISO 11608-2. Elaborada em aço inox grau médico, possui duas extremidades, sendo uma para a perfuração do recipiente (flaconete) e extração do medicamento, e a outra, com ponta trifacetada, e extensão lubrificada, para penetrar a epiderme, alcançando o tecido subcutâneo. Elaborada em diversos tamanhos (diâmetros x comprimentos), adequados à administração subcutânea em pacientes adultos ou pediátricos.

Modelos cadastrados

Tamanho	mm	
	diâmetro	comprimento
26G x 5,0mm	0,45	5,0
26G x 6,0mm	0,45	6,0
26G x 8,0mm	0,45	8,0
26G x 10,0mm	0,45	10,0
26G x 12,0mm	0,45	12,0
27G x 5,0mm	0,40	5,0
27G x 6,0mm	0,40	6,0
27G x 8,0mm	0,40	8,0
27G x 10,0mm	0,40	10,0
27G x 12,0mm	0,40	12,0
28G x 5,0mm	0,36	5,0
28G x 6,0mm	0,36	6,0
28G x 8,0mm	0,36	8,0
28G x 10,0mm	0,36	10,0
28G x 12,0mm	0,36	12,0
29G x 5,0mm	0,33	5,0
29G x 6,0mm	0,33	6,0
29G x 8,0mm	0,33	8,0
29G x 10,0mm	0,33	10,0
29G x 12,0mm	0,33	12,0

Tamanho	mm	
	diâmetro	comprimento
30G x 5,0mm	0.30	5,0
30G x 6,0mm	0.30	6,0
30G x 8,0mm	0.30	8,0
30G x 10,0mm	0.30	10,0
30G x 12,0mm	0.30	12,0
31G x 4,0mm	0.25	4,0
31G x 5,0mm	0.25	5,0
31G x 6,0mm	0.25	6,0
31G x 8,0mm	0.25	8,0
31G x 10,0mm	0.25	10,0
31G x 12,0mm	0.25	12,0
32G x 4,0mm	0.23	4,0
32G x 5,0mm	0.23	5,0
32G x 6,0mm	0.23	6,0
32G x 8,0mm	0.23	8,0
33G x 4,0mm	0.20	4,0
33G x 5,0mm	0.20	5,0
33G x 6,0mm	0.20	6,0
34G x 3,5mm	0.18	3,5
34G x 4,0mm	0,18	4,0
34G x 5,0mm	0,18	5,0

Uso único - descartável - Látex free - Esterilizada em óxido de Etileno

Instruções de Uso

Antes de iniciar o procedimento, selecione o tamanho da agulha (diâmetro x profundidade) de acordo com as características do paciente, verifique a integridade da embalagem e data de validade do produto; Higienize as mãos, conforme orientação institucional;

- 1 Retire o lacre de segurança do produto, puxando-o para cima;
- 2 Utilizando um swab de álcool, faça a antisepsia da tampa perfurante do medicamento na caneta aplicadora, e em linha reta, conecte-a a base giratória da agulha, rosqueie até travar;
- 3 Selecione a dosagem da insulina ou medicamento, girando o seletor de medicamento;
- 4 Retire e guarde a capa transparente da agulha;
- 5 Faça a assepsia do local de injeção com swab de álcool;
- 6 Retire o protetor da agulha, e introduza em ângulo de 90°;
- 7 Pressione o botão de injeção da medicação, e mantenha-o pressionado por 10 segundos aproximadamente (a fim de que toda a dosagem do medicamento, penetre no tecido subcutâneo);
- 8 Retire a agulha, puxando a caneta para cima;
- 9 Cuidadosamente, posicione a capa transparente sobre uma superfície reta, encaixe a agulha dentro da capa empurrando-a com apenas uma mão, sem tocá-la;
- 10 Com a capa encaixada, desrosqueie a agulha, e descarte em recipiente rígido próprio para material perfuro cortante.

Validade

5 anos à partir da data de fabricação


Conservação, Armazenamento e Transporte

Armazenar em local limpo, seco, com excelente ventilação, sem presença de gases corrosivos, afastado da luz solar e calor excessivo, manter temperatura ambiente controlada;
Proteger da chuva ou umidade excessiva, observar os cuidados no transporte e armazenamento de produtos para a saúde, definidos pela ANVISA;

Advertência/Precaução

- * Não utilizar caso a embalagem esteja violada, ou úmida;
- * Manipular utilizando técnica asséptica;
- * Utilizar técnica de reencape sem tocar na tampa transparente, evitando acidentes perfuro cortantes;
- * Descartar em recipiente específico para material perfuro cortante, seguir as orientações institucionais.



 Rua Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande
Cariacica/ES CEP: 29146-430

 www.bramedhospitalar.com.br
contato@bramedhospitalar.com.br

 (27) 3070-6870

Importado e Distribuído

BRAMED comércio hospitalar do Brasil Ltda

Rua Mário Passos Costa, 378, Campo Grande, Cariacica - ES - CEP 29146-040 - CNPJ 28.345.933/0001-30

Fabricado por: Zhejiang INI Medical Devices Co. Ltd – China

Responsável Técnico: Simone M. M. M. Garcia - Coren-ES 82157

Versão resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.
Maiores informações requisiite pelo email produto@bramedhospitalar.com.br