

Produto

AGULHA ROMBA PARA ASPIRAÇÃO

Cadastro / Registro M.S.

81840540001

Indicação de Uso

Agulha Romba, para uso exclusivo na aspiração, extração, transferência de preparações líquidas farmacêuticas, que possui a ponta romba, a fim de evitar acidente com o profissional da área de saúde, atendendo a NR32. Indicado para uso em instituições médicas ou laboratórios.

Modelos cadastrados

CÓDIGO INTERNO	SISTEMA MÉTRICO	GAUGE	COR
MDAR2516	25X 1.6mm	16	VERMELHO
MDAR4016	40x1.6mm		
MDAR2514	25x1.4mm	17	
MDAR4014	40x1.4mm		
MDAR2512	25x1.2mm	18	
MDAR4012	40x1.2mm		
MDAR2511	25X1.1mm	19	
MDAR4011	40x1.1mm		
MDAR2509	25x0.9mm	20	
MDAR4009	40x0,9mm		

Instruções de Uso

- 1 Inspeção a integridade da embalagem, se estiver aberta ou danificada, descarte-a;;
- 2 Abrir a embalagem conforme técnica asséptica (não tocar na cânula);
- 3 Expor o canhão da agulha e conectá-lo ao bico de seringa;
- 4 Empurre o êmbolo da seringa no sentido do bico a fim de lubrificar a borracha de ajuste ou mobilizar o êmbolo;
- 5 Remova a tampa de proteção da agulha para realização do procedimento;
- 6 Inicie o procedimento de aspiração, transferência ou irrigação do líquido;
- 7 Descarte o material em uma caixa coletora de perfurocortantes.

Validade

5 anos à partir da data de fabricação



Rua Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande
Cariacica/ES CEP: 29146-430

www.bramedhospitalar.com.br
contato@bramedhospitalar.com.br

(27) 3070-6870

Conservação, Armazenamento e Transporte

O produto deve ser armazenado em local limpo, seco, com excelente ventilação, sem presença de gases corrosivos, afastado da luz solar, em Temperatura de -20°C a 50°C.

Advertência/Precaução

- * Dispositivo médico de uso único;
- * Descartar a agulha romba após o uso, em lixeira apropriada para descarte de perfurocortantes;
- * Proibido Reutilizar;
- * Proibido Reprocessar;
- * Produto estéril, atóxico e apirogênico.

Importado e Distribuído

BRAMED comércio hospitalar do Brasil Ltda

Rua Mário Passos Costa, 378, Campo Grande, Cariacica - ES - CEP 29146-040 - CNPJ 28.345.933/0001-30

Fabricado por: YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Responsável Técnico: Simone M. M. M. Garcia - Coren-ES 82157

Versão resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.
Maiores informações requisite pelo email produto@bramedhospitalar.com.br