

## Produto

### Cateter Intravenoso com Sistema de Segurança

## Cadastro / Registro M.S.

81840549004

## Indicação de Uso

O Cateter Intravenoso com Sistema de Segurança é um dispositivo de acesso ao sistema circulatório para administração de fluidos intravenosos, medicamentos intravenosos, quimioterápicos, suporte nutricional, administração intravenosa de sangue ou hemoderivados, manter a hidratação ou corrigir a desidratação e para retirada de amostras de sangue.

## Modelos cadastrados

CATETER Cath					CATETER Alpha				
CÓDIGO INTERNO	SISTEMA MÉTRICO	GAUGE	FLUXO	COR	CÓDIGO INTERNO	SISTEMA MÉTRICO	GAUGE	FLUXO	COR
LMCCS451614	1,6x45mm	14	270 ML	LARANJA	LMCASS451614	1,6x45mm	14	270 ML	LARANJA
LMCCS452114	2,1x45mm	14	270 ML		LMCASS452114	2,1x45mm	14	270 ML	
LMCCS451316	1,3x45mm	16	180ML	CINZA	LMCASS451316	1,3x45mm	16	180ML	CINZA
LMCCS451716	1,7x45mm	16	180 ML		LMCASS451716	1,7x45mm	16	180 ML	
LMCCS451217	1,2x45mm	17	125 ML	BRANCO	LMCASS451217	1,2x45mm	17	125 ML	BRANCO
LMCCS451517	1,5x45mm	17	125 ML		LMCASS451517	1,5x45mm	17	125 ML	
LMCCS450918	0,9x45mm	18	90 ML	VERDE	LMCASS450918	0,9x45mm	18	90 ML	VERDE
LMCCS451318	1,3x45mm	18	90 ML		LMCASS451318	1,3x45mm	18	90 ML	
LMCCS330918	0,9x33mm	18	90 ML	ROSA	LMCASS330918	0,9x33mm	18	90 ML	ROSA
LMCCS133318	1,3x33mm	18	90 ML		LMCASS133318	1,3x33mm	18	90 ML	
LMCCS083220	0,8x32mm	20	60 ML	AZUL	LMCASS083220	0,8x32mm	20	60 ML	AZUL
LMCCS113220	1,1x32mm	20	60 ML		LMCASS113220	1,1x32mm	20	60 ML	
LMCCS062522	0,6x25mm	22	36 ML	AMARELO	LMCASS062522	0,6x25mm	22	36 ML	AMARELO
LMCCS092522	0,9x25mm	22	36 ML		LMCASS092522	0,9x25mm	22	36 ML	
LMCCS051924	0,5x19mm	24	20 ML	AMARELO	LMCASS051924	0,5x19mm	24	20 ML	AMARELO
LMCCS071924	0,7x19mm	24	20 ML		LMCASS071924	0,7x19mm	24	20 ML	

CATETER Beta				
CÓDIGO INTERNO	SISTEMA MÉTRICO	GAUGE	FLUXO	COR
LMCBSS451614	1,6x45mm	14	270 ML	LARANJA
LMCBSS452114	2,1x45mm	14	270 ML	
LMCBSS451316	1,3x45mm	16	180ML	CINZA
LMCBSS451716	1,7x45mm	16	180 ML	
LMCBSS451217	1,2x45mm	17	125 ML	BRANCO
LMCBSS451517	1,5x45mm	17	125 ML	
LMCBSS450918	0,9x45mm	18	90 ML	VERDE
LMCBSS451318	1,3x45mm	18	90 ML	
LMCBSS330918	0,9x33mm	18	90 ML	ROSA
LMCBSS133318	1,3x33mm	18	90 ML	
LMCBSS083220	0,8x32mm	20	60 ML	AZUL
LMCBSS113220	1,1x32mm	20	60 ML	
LMCBSS062522	0,6x25mm	22	36 ML	AMARELO
LMCBSS092522	0,9x25mm	22	36 ML	
LMCBSS051924	0,5x19mm	24	20 ML	AMARELO
LMCBSS071924	0,7x19mm	24	20 ML	

## Instruções de Uso

- 1 Seleccione o tamanho correto do cateter para o procedimento;
- 2 Inspeccione a integridade da embalagem, se tiver aberta ou danificada descarte-a;
- 3 Abra a embalagem de forma asséptica;
- 4 Remova a tampa protetora da agulha, posicione o bisel da agulha voltado para cima;
- 5 Puncione a veia do paciente e verifique o retorno sanguíneo na câmara Flashback;
- 6 Avance com a cateter e puxe delicadamente o canhão da agulha simultaneamente no sentido contrário;
- 7 Remova a agulha para acionar o sistema de segurança, o bisel será recoberto automaticamente;
- 8 Conecte o cateter com o dispositivo da sua escolha para realizar o procedimento. Após o uso descarte o produto no coletor perfurocortante

## Validade

5 anos à partir da data de fabricação

## Conservação, Armazenamento e Transporte

O produto deve ser armazenado em local limpo, seco, com excelente ventilação, sem presença de gases corrosivos, afastado da luz solar, em temperatura ambiente.

## Advertência/Precaução

- \* O produto deve ser utilizado de acordo com as instruções de utilização.
- \* Não utilizar se embalagem estiver danificada, o produto é garantido estéril, não pirogênico, se a embalagem não tiver sido aberto ou danificada.
- \* Inspeccione visualmente e verifique cuidadosamente o produto e a embalagem antes do uso.
- \* Nunca tente reinserir parcialmente ou completamente a agulha já retirada;
- \* Produto estéril, atóxico e apirogênico.

## Importado e Distribuído

### BRAMED comércio hospitalar do Brasil Ltda

Rua Mário Passos Costa, 378, Campo Grande, Cariacica - ES - CEP 29146-040 - CNPJ 28.345.933/0001-30

Fabricado por: LARS MEDICARE PVT. LTD. - ÍNDIA

Responsável Técnico: Simone M. M. M. Garcia - Coren-ES 82157

Versão resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Maiores informações requisiite pelo email [produto@bramedhospitalar.com.br](mailto:produto@bramedhospitalar.com.br)