

### Produto

Filme Transparente Rolo PU

### Cadastro / Registro M.S.

81840540002

### Indicação de Uso

Película ultrafina de poliuretano transparente, impermeável a líquidos, porém permeável ao vapor da respiração, com camada de adesivo, especificamente projetada para a cobertura e proteção de curativos não-estéreis, fixação de dispositivos médicos, proteção mecânica da pele contra lesões por pressão, fricção, ou contusões. É impermeável, flexível, conformável e extensível; além de propiciar conforto ao paciente, protege da penetração de umidade ou sujidades.

### Modelos cadastrados

LARGURA	COMPRIMENTO					MODELO
2,5cm	2,0 metros	4,55 metros	5,0 metros	9,14 metros	10,0 metros	NO TOUCH CAIXA DISPENSER
5cm						
7,5cm						
10,0cm						
15,0cm						
20,0cm						
30,0cm						
40,0cm						
50,0cm						
60,0cm						

Uso único - descartável - Látex free - Não estéril

## Instruções de Uso

### Aplicação

- 1 Certifique-se de que a pele esteja limpa e seca antes da aplicação;
- 2 Corte o filme, no comprimento necessário;
- 3 Suspenda as bordas do Liner primário (papel branco), dobrando levemente o filme;
- 4 Remova a parte inicial do liner, expondo a parte adesiva;
- 5 Fixe a parte adesiva do filme na pele, e remova o restante do Liner primário (papel branco), aderindo todo o filme sem esticá-lo;
- 6 Suspenda as bordas do liner secundário (transparente), pelas ondulações demarcadas em azul;
- 7 Remova delicadamente todas as partes do liner secundário, alisando o filme com a ponta dos dedos, garantindo uma boa adesão, sem rugas ou bolhas.

### Remoção

- 1 Desprenda delicadamente a extremidade de uma das bordas;
- 2 Puxe e estique o filme, de dentro para fora, mantendo sempre a sustentação da pele, com a outra mão, até que o filme se desprenda totalmente.

## Validade

3 anos à partir da data de fabricação

## Conservação, Armazenamento e Transporte

Armazenar em local limpo, seco, com excelente ventilação, sem presença de gases corrosivos, afastado da luz solar em temperatura ambiente não superior a 60°C ou inferior a -20°C

## Advertência/Precaução

- \* Não utilizar em pacientes com alergia conhecida a adesivos acrílicos;
- \* Não utilizar em procedimentos assépticos;
- \* Durabilidade aproximada no local de aplicação, 7 ou mais dias. Deve ser substituído conforme protocolo institucional, ou indicação médica, ou da enfermagem.

## Importado e Distribuído

### BRAMED comércio hospitalar do Brasil Ltda

Rua Mário Passos Costa, 378, Campo Grande, Cariacica - ES - CEP 29146-040 - CNPJ 28.345.933/0001-30

Fabricado por: Shandong Fengao Medical Technology Co., Ltd – China

Responsável Técnico: Simone M. M. Garcia - Coren-ES 82157